

PRODUKTDATABLAD

Flocare Infinity Go Rygsæk

Rygsæk til Flocare Infinity ernæringspumpe, ernærings sæt og sondeernæring (500 ml og 1000 ml), som er udviklet til mobile børn og voksne med behov for sondeernæring.

Flocare Infinity Go Rygsæk er stabil og kan stilles på natbordet og kan anvendes som håndtaske, skuldertaske eller fikseres på en kørestol. Rygsækken er let at rengøre og er vaskbar ved 40°C. Anvend ikke kemikalier.



Materialer: Fremstillet af nylon.

Indikation: Velegnet til mobile børn og voksne med behov for sondeernæring.

Klassifikation: Klasse: I

Steril vare: N/A

Beskrivelse:

Rygsækken har justerbare stropper, bryst- og taljerem samt to ydre rum. Den er ergonomisk udformet for at opnå god komfort. Den har rem til at fastgøre sondeernæringen, særskilt plads til stativ og pumpe samt åbning i siden til ernærings sæt. Vægt: 1820 g inkl. pumpe stativ og 500 ml sondeernæring. Højde: 34 cm (voksen), 31,7 cm (barn).

Brugervejledning:

1) Lyn lynlåsen på forsiden af rygsækken op. **2)** Anbring pumpe og sondeernæring i stativet. Sondeernæring fastgøres med rem og spænde. **3)** Anbring stativet med pumpe og sondeernæring i rygsækken. **4)** Anbring ernærings sættet i lommen på stroppen. **5)** Åbn lynlåsen på forsiden og før ernærings sættet ned i rygsækken. **6)** Før ernærings sættet ud gennem åbningen på siden og tilslut sonde eller gastrostomikateter/knapsonde. **7)** Åbn den lille lomme på forsiden for at starte pumpen. **8)** Ved vask – åbn lynlåsen inde i rygsækken og tag polstringen ud, inden du vasker rygsækken. **9)** Rygsækken kan hænges op på kørestol, barnevogn eller seng med skulderremmen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1124980	Flocare	Infinity Go Rygsæk, barn	1 stk.	-	35786
1124983	Flocare	Infinity Go Rygsæk, voksen	1 stk.	-	35785

For sundhedsfagligt personale