


FARRELL® Valve

Ventilsystem

**Fjerner overskydende luft fra ventriklen
ved sondeernæring givet på pumpe**

Korrekt opsætning af Farrell® Valve System

- Luk både den hvide ❶ og den blå ❷ klemme på Farrell slangen
- Påmonter ernæringssettet ❸ til pumpen som sædvanlig
- Sæt madslangen fast på Y stykket på Farrell slangen ❹
- Åbn den hvide ❶ klemme på Farrell slangen
- Tryk "fill" på pumpen og start indtil indholdet er ca. 5-10 cm oppe i Farrell slangen ❺
- Luk den hvide ❶ klemme. Åbn derefter den blå ❷ klemme og fyld resten af madslangen som normalt
- Åben nu den hvide klemme og start pumpen

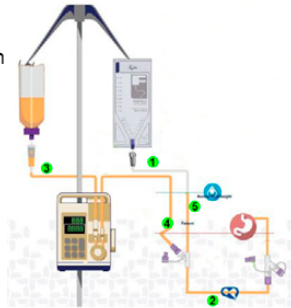

*OBS Ernæringspose og Farrell pose skal hænge i samme niveau
Aspirér for luft inden tilslutning af sondemaden*

- ◆ Varenr. 44-4100 pakke a 30 poser
Medicinsk udstyr

For yderligere information kontakt kundeservice på telefon: 44528888 eller
e-mail: bestil@mylan.com



MEDA

Meda AS (A Mylan Company) • Solvang 8 • 3450 Allerød •
Tlf.: 44 52 88 88 • Fax: 44 52 88 99 • www.meda.dk

MEDA

Hvad er FARRELL?

FARRELL Valve er et system, der fungerer som ventil for overskydende luft ved sondeernæring givet på pumpe. På den måde undgår patienten oppustethed og sure opstød.

FARRELL Valve

- ◆ fungerer som ventil for overskydende luft og ernæring
- ◆ sikrer rette indtag af medicin og ernæring
- ◆ reducerer smerte og ubehag hos patienten
- ◆ udligner ernæringsindtaget ved langsom mavetømning
- ◆ holder i 24 timer
- ◆ kan anvendes til neonatale, børn og voksne

FARRELL Valve produktbeskrivelse

1. FARRELL Pose - 1 str.
2. Udluftningsventil
3. ML markering
4. ENFit Connectors
5. Til ophæng
6. Reguleringsklemme (hvid)
7. Klemmeskrue (blå)



Hvem kan have gavn af FARRELL?

Patienter, som

- ◆ har langsom ventrikeltømning
- ◆ har tendens til kvalme/opkastning under madindgift
- ◆ har tendens til sure opstød
- ◆ har tendens til oppustethed
- ◆ sluger meget luft, fx under CPAP-behandling
- ◆ lider af recidiverende aspirationspneumonier

Hvordan virker FARRELL?

FARRELL virker ved hjælp af et hydrostatisk tryk, som gør, at sondemaden opsamles i FARRELL posen, hvis trykket i ventriklen er stort. Og når den overskydende luft er blevet evakueret gennem ventilen i posen, løber sondemaden tilbage i ventriklen

Hvordan skal jeg give medicin?

- ◆ Brug port tæt på sonden
- ◆ Stop pumpen
- ◆ Luk den blå klemme samt evt. klemme på selve sonden
- ◆ Sæt sprøjten til den ledige port
- ◆ Skyl med vand
- ◆ Indgiv lægemidlet
- ◆ Skyl efter med vand
- ◆ Åben begge klemmer og forsæt evt. madindgiften

Bemærk, at volumen i FARRELL slangen er 9,6 ml – og 3,2 ml fra Y stykket til FARRELL slange.

Opsætning af FARRELL posen – tjek guide på bagsiden

- ◆ Aspirer luften fra ventriklen med en sprøjte
- ◆ FARRELL posen og ernæringsposen skal hænge i niveau
- ◆ FARRELL Y stykket skal være placeret under patientens ventrikel

OBS!

- **Pumpen alarmerer ikke for stop, når FARRELL posen er sat til**
- **Den blå ventil på FARRELL posen må ikke blive våd – sker det, skal en ny pose tages i brug**