


Kliniderm® **debride**

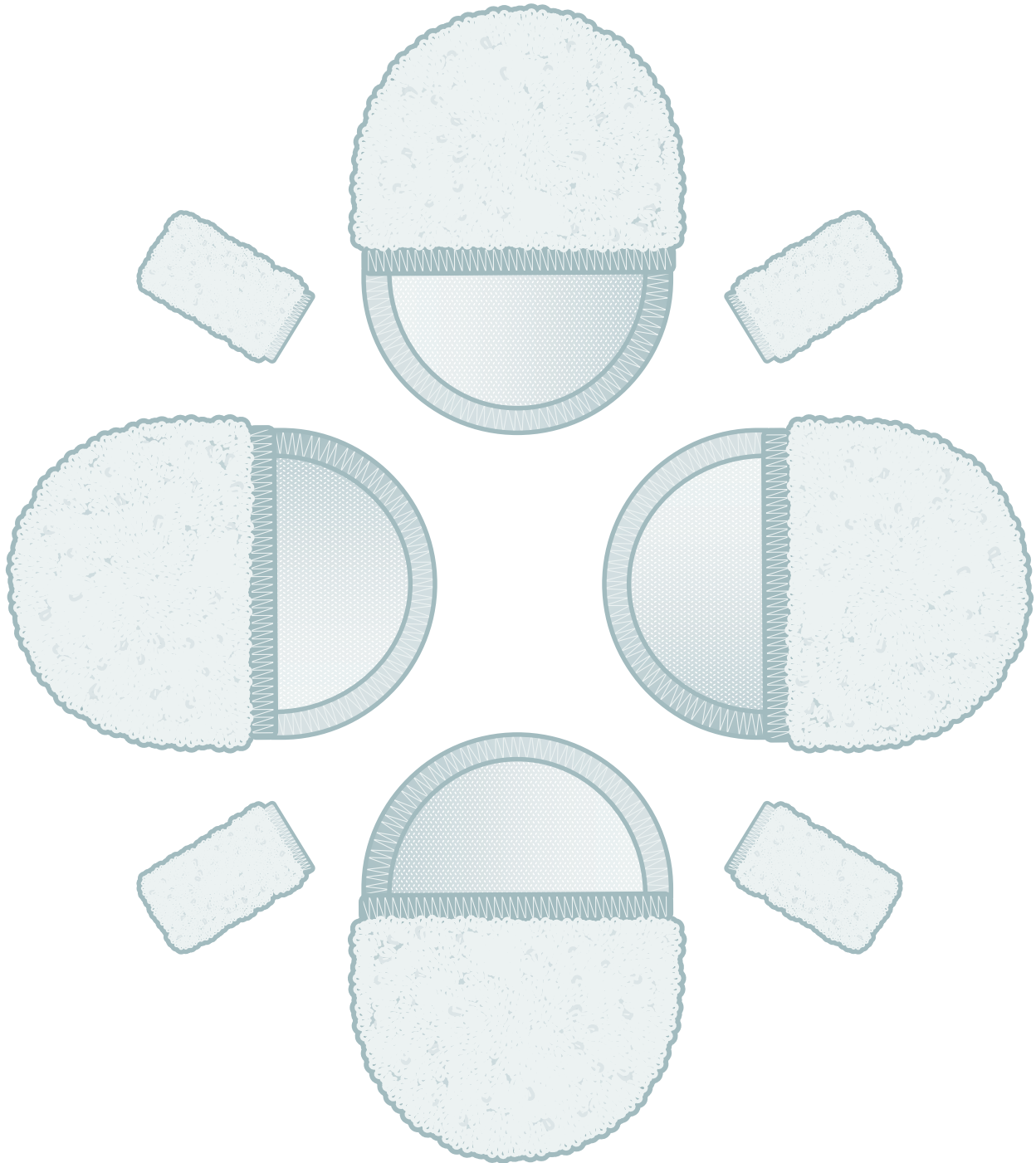

Blød • Effektiv • Sikker

Kliniderm® debride

Kliniderm® leverer de avancerede produkter fra Klinion - et velkendt mærke inden for sårbehandling. I mere end 30 år har Klinion tilbudt patienter over hele verden gode kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Takket være et bredt produktudvalg sikrer produkter fra Kliniderm optimal brugerkomfort.

Kliniderm® Debride er beregnet til at blive brugt som en hurtig, yderst effektiv og sikker metode til mekanisk debridering. Bruges til at absorbere ekssudat, celleaffald og keratose under debridering og er skånsom mod intakt væv. Kliniderm® Debride Pocket anvendes til mindre overfladiske sår, eller hvor der er behov for ekstra kontrol, når der udøves tryk.

Indikationer for brug

Kliniderm® Debride er velegnet til behandling af overfladiske (akutte og kroniske) sår og den omkringliggende hud i følgende sår:

- Diabetiske fodsår
- Arterielle og venøse sår
- Tryksår
- Postoperative sår
- Rifter og hudafskrabninger
- Forbrændinger og skoldninger
- Lymfødemer
- Nekrotisk væv

Kliniderm® Debride har en stærk oprensningseffektivitet, effektiv bakteriebinding og en meget høj grad af biofilmfjernelse. Muliggør blød debridering uden at irritere vævet og udmærker sig ved blød nænsom påføring.


Applikationsvejledning

Kliniderm® Debride og Kliniderm® Debride Pocket kan bruges skiftevis. Lommestørrelsen anbefales til behandling af små sår eller hvis der er behov for ekstra kontrol, mens debrideringspad'en anbefales til behandling af store overfladiske sår. Mekanisk debridering ved hjælp af Kliniderm® Debride opnås bedst ved at følge anvisningerne nedenfor:

1. Opblød Kliniderm® med cirka 50-60 ml opløsning til såroprensning
2. Før den fugtede side over såret i en cirkulær bevægelse, mens der udøves let tryk

Blød, effektiv oprensning

Mekanisk debridering er en effektiv metode til at fjerne celleaffald, nekrotisk væv og keratose fra såret. Mikrofiberpad'en med "looped" monofilamentpolyester kan bruges i stedet for traditionelle gazer for effektiv oprensning af såret.

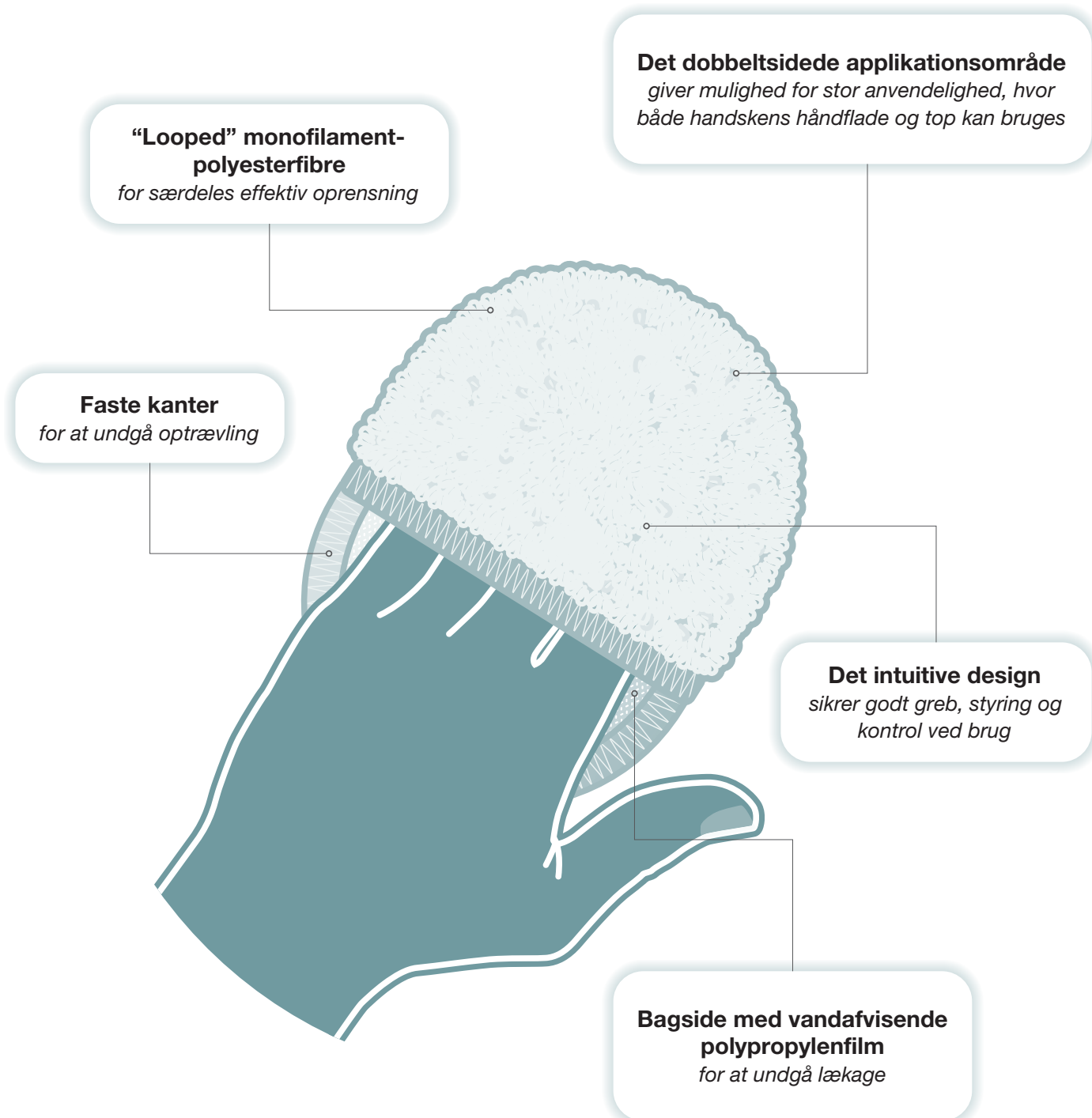

Sikker, særdeles effektiv og hurtig mekanisk debridering



Bløde monofilamentløgger
Bidrager til at reducere smerte og er skånsom mod det intakte væv



Blød nænsom påføring
Giver mulighed for kontrol og udøvelse af et passende tryk



Absorberer eksudat
Muliggør effektiv mekanisk debridering



Lommestørrelse tilgængelig
Når der er behov for ekstra kontrol



Oprensning
For at fjerne biofilm og bakterier fra såret



Intuitivt design
Mulighed for dobbeltsidet brug af pad'en



A MEDIQ COMPANY

Medeco B.V.
Brandpuntlaan Zuid 14, 2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands



www.medeco.org

MED_01_20190301