

DK

heel up[®] *fix*

Forebyggelse og behandling
af tryksår på hælene

Total aflastning...
Udført perfekt...

Nyhed

Trykaflastning på luft..

fix medium

Stabiliserende
luftcelle holder
Heel Up FIX
på plads ved
bevægelse

Omsluttende luftcelle

Ny sikkerheds
ventil placeret
for let
betjening

Fastgjort bred
fikserings strop

- Overlegen aflastning.
- Nem og hurtig at bruge
- En-patient brug i op til 6 til 8 uger.
- En-patient brug sikrer optimal hygiejne.
- Stop Up bånd sikrer korrekt oppumpning.
- Findes i flere størrelser.
- Testet og godkendt i henhold til ISO 10993-10 hudirritation og overfølsomhed.


LEVABO[®]
medical cushions



fix long



Heel Up® har nogle vigtige egenskaber som giver en række fordele.

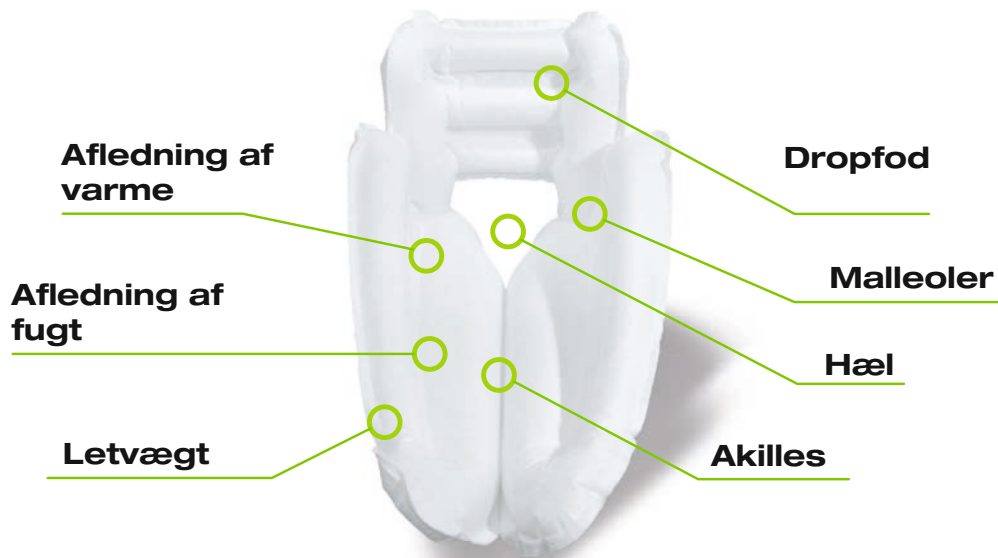

Den ydre beklædning af nonwoven filt afleder, meget effektivt, fugt og varme væk fra huden og sikrer, at huden ikke klæber til puden. Den kan aftørres med en fugtig klud, alkohol eller andet egnet desinfektionsmiddel.



Der er gjort plads til akillessenen imellem de 2 bærende celler. Cellerne er affasede så læg og knæ ikke belastes unødigt.



Der er åbent til hælen og gjort plads til malleolerne for at sikre fuld aflastning.



Sejlet og luften under foden understøtter forfoden og forebygger dropfod.

Fra nul til trykaflastning på mindre end 60 sekunder..



Fold Heel Up® ud og indsæt pumpen i den selvslukkende ventil.



Pump op...



Pump op indtil det omsluttende papirbånd Stop Up® brister - og fjern pumpen. Heel Up® er nu klar til brug.



Placer foden i Heel Up® og luk båndet over åbningen.



Kontroller at hælen er løftet ca. 1½ fingerbredde over underlaget.



Færdig...



LEVABO[®]
medical cushions

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.com