

# Oppumpning


all up®

heel up®



1

Indsæt adapter i ventilåbning,  
Drej og pres let adapteren ned i ventilen til den sidder fast.  
Pres kun adapterens yderste "rør" ned i ventilen !

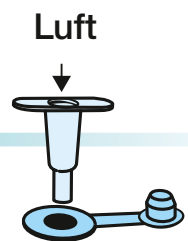


2

all up®  
- Pump puden 3/4 op.

heel up®  
Følg vejledningen på hælløfteren.


3

Træk adapteren ud af ventilen, ved at holde imod  
ventilen med 2 fingre, som anvist på figuren.

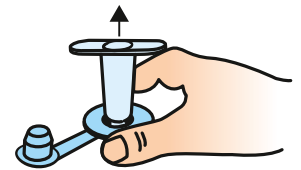

4

Luk luft ud til løftehøjde med adapteren.  
VIGTIGT ! Pudnen må ikke være hårdt oppumpet.  
Den skal være blød og eftergivende for optimal lejrning.

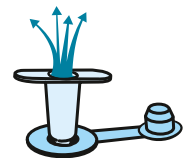

5

Luk ventilen.



6

For yderligere sikring kan ventilen  
forsynes med ventildække.

