



Accu-Chek® LinkAssist Plus vejledning.

Brug den nye **Accu-Chek LinkAssist Plus** indføringsenhed til at indføre dit **Accu-Chek FlexLink Plus** infusionssæt let og næsten smertefrit, selv ved infusionssteder, der er svære at nå.



- A Udløserknop
- B Sikkerhedsudløser
- C Skyder
- D Ladekammer



1 Fastgør infusionssættet, og klargør det i henhold til instruktionerne, der følger med insulinpumpen.



2 Sæt nåleæsken i, så den farvede del af det selvklæbende bagsidepapir vender mod sikkerhedsudløseren.



3 Fjern begge dele af det selvklæbende papir på bagsiden af hæfteplasteret.



4 Hold på begge sider af skyderen, og træk tilbage, indtil den stopper. Indføringsnålen med den bløde kanyle kommer til syne.



5 Anbring indføringsenheden på dit valgte infusionssted. Tryk indføringsenheden mod huden, så sikkerhedsudløseren ikke længere er synlig.



6 Tryk på udløserknappen for at indføre kanylen.




7 Fjern indføringsenheden.




8 Træk skyderen tilbage til startpositionen.



9 Tryk hæfteplaster fast på infusionsstedet, og kontroller, at det har god kontakt med huden.

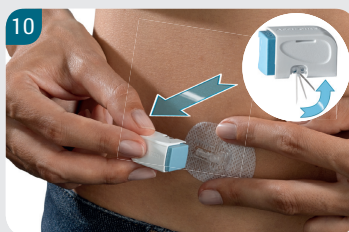

10 Fjern nåleæsken med indføringsnålen i en ret vinkel, så hovedsættet bliver siddende på huden. Indføringsnålen trækker sig **automatisk** tilbage i nåleæsken.

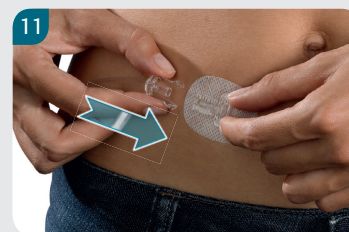

11 Forbind det klargjorte infusionssæt til hovedsættet. Når pumpebehandlingen genoptages, skal der bruges en insulinbolus på 0,7 U til at fylde hovedsættet og den bløde kanyle.

Se den medfølgende vejledning for detaljerede instruktioner og vigtige sikkerhedsoplysninger.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK og ACCU-CHEK LINKASSIST er varemærker tilhørende Roche. Kontakt Accu-Chek kundeservice for yderligere informationer på telefon 36 39 99 54 eller e-mail dk.accu-chek@roche.dk

© 2010 Roche Diagnostics



www.accu-chek.dk
Roche Diagnostics A/S,
Industriholmen 59, 2650 Hvidovre.

ACCU-CHEK®