

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Braun Thermoscan PRO 6000 øretermometer

Welch Allyn Braun Thermoscan PRO 6000 termometer med tydeligt belyst display og temperaturinterval på 0,1°C er til måling af temperaturer i øret hos patienter i alle aldre, dog ikke hos for tidligt fødte babyer. Infrarødt øretermometer i ergonomisk design, der ligger godt i hånden.

- **Måleenhed:** Celsius eller Fahrenheit
- **Måletid:** 2-3 sekunder pr. måling
- **Vist måleinterval:** +20,0 til 42,2°C
- **Målenøjagtighed:** +35° - +42° C med en nøjagtighed på +/- 0,2°C.
- **Omgivende temperatur og luftfugtighed ved brug:** Omgivende temperatur +10 til +40°C, relativ luftfugtighed op til 95% uden kondensdannelse
- **Batteri:** 2 x 1,5 V type AA (alkaline) eller en genopladelig batteripakke
- Der kan foretages 700 målinger på AA batterier og 1000 målinger på den genopladelige batteripakke

Termometret har stopursfunktion med auditiv alarm hvert 15 sekund op til 60 sekunder. Hvis det ønskes, kan stopuret afsluttes undervejs.

Kan anvendes sammen med Welch Allyn CSM til elektronisk dataoverførsel.

Termometret har en rengøringsvenlig overflade med minimale riller og sprækker. Det anbefales at aftørre termometret med en fugtig klud.

Der kan anvendes 70% husholdningssprit eller isopropylalkohol til desinfektion. Forsøg ikke at desinficere følerdelen på termometeret ved at nedsænke det i alkohol eller i vand.

Leveres med lille basestation med plads til 1 æske prober. Der kan desuden tilkøbes ladestation med genopladelig batteripakke samt øreprober.



PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Braun Thermoscan PRO 6000 øretermometer

| | |
|-----------------------------------|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | - |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| Særlig mærkning: | Opfylder kravene i DS/EN ISO 60601-1 :2006 Elektromedicinsk udstyr – Del 1 |
| CE klassifikation: | Klasse IIa |
| Steril: | Nej |
| Opbevaring: | Opbevares ved -25 til +55°C og ved en relativ fugtighed på 15-95 % uden kondensdannelse |
| Holdbarhed: | - |
| Bortskaffelse vare: | Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler. |
| Bortskaffelse emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bemærkninger: | 3 års garanti på termometer, ladestation og genopladelige batterier. |

Produkt

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|------------------------------|--|---------|-----------|
| 7016378 | Welch Allyn Braun thermoscan | PRO 6000 øretermometer m/basestat. t/1 æske prober | 1 stk. | 06000-200 |

Tilbehør

| | | | | |
|---------|------------------------------|---|------------------|-----------|
| 7016379 | Welch Allyn Braun Thermoscan | Prober til Pro 6000 øretermometer | 1 stk. | 06000-800 |
| 7016381 | Welch Allyn Braun Thermoscan | Pro 6000 lader stand med genopladelig batteripakke | Pakke a 200 stk. | 06000-125 |
| 6183123 | Welch Allyn | Sikkerhedsrem med 1,8m kabel til Pro6000 termometer | | 106201 |
| 6050942 | Welch Allyn | Genopladeligt batteri PRO6000 | | 104894 |
| 7016368 | Welch Allyn | Kalibreringstest, 9600 plus | | 01802-110 |