

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Ethanol Disinfection 80%

Engangskludde klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

Ethanol Disinfection 80% kludene er klar til brug direkte fra pakken, og er derfor den optimale løsning til desinfektion af områder, der tåler alkohol i f.eks. sundhedsplejen, fødevarersektoren samt tandlæge- og veterinærklinikker mm. Godkendt til fødevarer virksomheder (J.nr. 2015-29-7105-00105).

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning. De er fremstillet af polyester og afgiver derfor så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80%

●●○ Intermediate-Level

Indholdsstoffer: Ethanol 700g/kg, Isopropanol 50g/kg. Uden parfume og farvestoffer


Holdbarhed: Uåbnet 2 år. Efter åbning er kludene holdbare i 6 måneder

| Varenr. | Forpackningsstr. | Anvendelse |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 7287581 | Mini - 100 wipes 20 x 20 cm | Til desinfektion af 0,5 m ² |
| 7287570 | Small - 25 wipes 20 x 30 cm | Til desinfektion af 1 m ² |
| 7287572 | Large - 20 wipes 40 x 30 cm | Til desinfektion af 2,5 m ² |

Biocidprodukt til professionelt brug.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne for anvendelse.

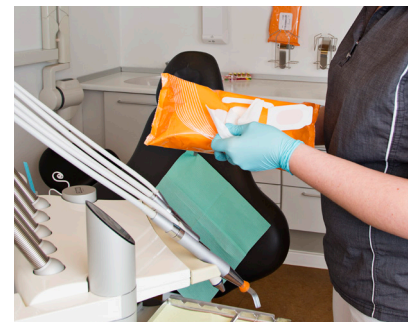

EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Bearbejd overfladen, så den holdes fugtig i henhold til kontakttid angivet på forpakningen.

Produktet er ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader og visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker
- Daginstitutioner

plum

Ethanol Disinfection

Ethanol Disinfection 80% er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Murine norovirus.

Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion.

| Bakterier | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Organisme | Kontaktetid | Teststandard |
| Enterococcus hirae | 1 min | EN16615 EN13727 EN13697 |
| Escherichia coli | 1 min | EN13697 |
| VRE | 1 min | EN16615 EN13727 EN13697 |
| MRSA | 1 min | EN16615 EN13727 EN13697 |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 min | EN16615 EN13727 EN13697 |
| Staphylococcus aureus | 1 min | EN16615 EN13697 EN13727 |

| Virus | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Organisme | Kontaktetid | Teststandard |
| HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Coronavirus | 1 min | EN14476 |

| Svampe / Gær | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| Organisme | Kontaktetid | Teststandard |
| Aspergillus brasiliensis | 2 min | EN13697 EN13624 |
| Candida albicans | 1 min | EN16615 EN13624 |
| | 2 min | EN13697 |

| Tuberkulose / Mykobakterier | | |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| Organisme | Kontaktetid | Teststandard |
| Mycobacterium terrae Mycobacterium avium | 1 min | EN14348 |



Produktet er CE-mærket.
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.