



## AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTER

### Anios RL

#### AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTER

- Tørre aktivator til hurtig og pletfri tørring
- Særdeles kompatibelt med polysulphones
- Tilpasset til brug i alle typer maskiner



# Anios RL

Afspændingsmiddel til instrumenter



Anios RL  
5 L dunk

## PRODUKTEGENSKABER

- Transparent klar væske
- pH koncentreret produkt ved 20°C ca. 7,2
- pH brugsopløsning ved 0,08%\*: ca. 5,8
- pH brugsopløsning ved 0,3%\*: ca. 6,2
- Densitet ved 20°C: 1,013

\*pH-værdimålinger under driftsbetingelser, altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

## FORPAKNING OG ORDRE INFORMATION

PRODUKT	PAKKESTØRRELSE	VARENUMMER
Anios RL	2 x 5 L dunk	3112390
Anios RL	1 x 20 L dunk	3112190

## ANVENDELSESOMRÅDE

Neutralt afspændingsmiddel til kirurgiske og medicinske instrumenter. Giver hurtig og pletfri tørring.

## BRUGSANVISNING

Koncentreret. Anvend i opløsning mellem 0,08 - 0,3% i koldt eller varmt vand (0,8 - 3ml pr liter vand) i forhold til type af maskine.

## INDEHOLDER

Sammensætning af overfladeaktive stoffer, skumdæmpningsmiddel, stabiliseringsmiddel, hjælpestoffer.

## OPBEVARING

Farligt - respekter forholdsreglerne ved brug (udarbejdet i henhold til gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: +5°C til +25°C.

## CERTIFIKATER

Kan rekvireres.


## MEDICINSK Udstyr ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs venligst label og produkt information.



UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL  
ANVENDELSE



 **LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Forhandles af:  
**ECOLAB APS.**  
Høfdingsvej 36.  
DK 2500. Valby  
Danmark

**ECOLAB**<sup>®</sup>

www.ecolab.dk